




proMEDANZ® Sinus можно применять для лечения нижних дыхательных путей в режиме без пульсации. Например с комплектом распылителя **JRT SEASONS S04F*** (арт. 253002)

** приобретается отдельно*

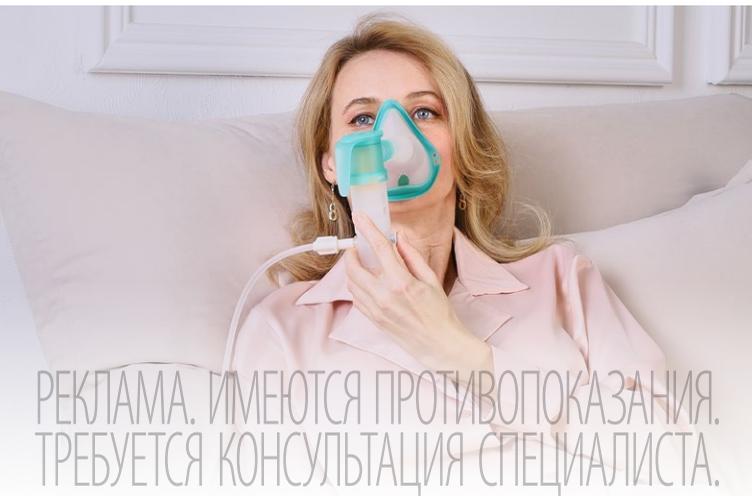

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИНГАЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА **proMEDANZ® SINUS /** СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ



JENT SINUS S02F

Комплект распылителя сменный
арт. 253001



НАЗАЛЬНЫЙ ДУШ

для систем ингаляционных
proMEDANZ®
арт. 232004



JRT SEASONS S04F

Комплект распылителя сменный
арт. 253002



ФИЛЬТРЫ

для компрессора NVS / NVS PRO
(уп. 5 шт.)
арт. 253010

Посетите наш сайт для получения
дополнительной информации:
www.synmed.ru



ООО « СинерМед »
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.49, а/я 15
тел.: +7 (495) 718-75-91
E-mail: sales@synmed.ru
www.synmed.ru

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



СОЗДАВАЯ НОВОЕ,
СЛЕДУЕМ ТРАДИЦИЯМ



ИНГАЛЯЦИОННАЯ
СИСТЕМА

proMEDANZ®

SINUS

ФУНКЦИЯ
ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПОДАЧИ АЭРОЗОЛЯ

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ГИГИЕНЕ

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КАК ПРОВОДИТЬ ИНГАЛЯЦИЮ?

Краткое руководство

Для более подробной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.

- 1 Помойте руки.



- 2 Установите в нижнюю секцию распылителя насадку на сопло, совместите верхнюю часть распылителя с нижней, точно совместив защёлки, и поверните до щелчка.



- 3 Соедините носовую насадку с изогнутым переходником с распылителем.



- 4 Вставьте одну из двух трубок-воздуховодов в разъём в нижней части распылителя, другой конец трубки присоедините к компрессору, к выходу "поток". Адаптер для пульсирующей подачи вставьте в верхнюю часть распылителя, вторую трубку-воздуховод присоедините к адаптеру и другой конец трубки присоедините к выходу "пульс" на компрессоре.



- 5 Для удобства управления процессом ингаляции можно использовать выключатель подачи воздуха. В таком случае трубка-воздуховод подключается к разъёму выключателя, потом выключатель подачи воздуха присоединяется к нижней части распылителя.



- 6 Откройте крышку распылителя и залейте в него нужное количество медикамента. Закройте крышку до щелчка.



- 7 Сядьте прямо. Поместите носовую насадку в ноздрю, другую ноздрю закройте окклюдером. Включите компрессор, чтобы начать распыление медикамента.



- 8 Во время ингаляции убедитесь, что в носовых ходах есть ощущение вибрации и мягкое нёбо перекрыто. Это необходимо для поддержания внутриносового давления, которое создает прибор за счет пульсирующей подачи аэрозоля, что и способствует проникновению медикамента в носовые синусы.

Сделать это просто:

- Произнесите звук "К" или "Ко-ко" как можно дольше, на выдохе с задержкой дыхания.
- Или откройте рот как можно шире, тогда мягкое небо перекроется автоматически.

- 9 Через 5-7 минут проведения ингаляции поменяйте ноздрю. Продолжите лечение как описано в шаге 7.

- 10 Когда ингаляция закончена, выключите компрессор. Отсоедините трубки-воздуховоды от распылителя, не отсоединяя их от компрессора. Включите компрессор на 20-30 секунд для продува конденсата из полости трубок.

Ингалятор proMEDANZ® Sinus может поставляться в комплекте с **назальным душем**. Он предназначен для промывания полости носа перед процедурой ингаляции.



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Краткое руководство

Для более подробной информации прочитайте и следуйте инструкции по применению.

- 1 Отсоедините две трубки-воздуховоды и адаптер для пульсации от распылителя.



- 2 Разъедините составные части распылителя

- 3 Погрузите все составные части распылителя в ёмкость с теплой водой с добавлением моющего средства для посуды, и тщательно промойте. Если ингаляция проводилась с выключателем воздушного потока, выключатель также промойте.



- 4 Извлеките части распылителя из мыльного раствора и тщательно прополощите в чистой воде.

- 5 Для дезинфекции поместите очищенные детали распылителя в ёмкость с питьевой водой и прокипятите в течение 5 мин. Проследите, что все части распылителя при кипячении погружены в воду, и не соприкасаются с горячими стенками ёмкости, чтобы избежать их повреждения.



- 6 Высушите все компоненты распылителя при комнатной температуре, разместив их на сухой ткани без ворсинок.

- 7 Храните распылитель в собранном виде в сухом и чистом месте.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.